

Piesel Piepser®

Gebrauchsanweisung



Piesel Piepser
macht mich wach,
wenn ich in das
Bettchen mach !



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einleitung	3
Technische Daten	4
Lieferumfang	4-5
Die Tagebücher	6
Anwendung	7
Anbringung	8-9
10 Tips für das erfolgreiche Training	10-11
Mögliche Fehler und deren Beseitigung	12
Batteriewechsel	13
Gerät einschalten	14
EG-Konformitäts-Erklärung	15

Sicherheitshinweis: Produkt enthält Kleinteile,
Batterieentsorgung bei Ihrem

Einleitung

Durch die Behandlung des nächtlichen Einnässens (Fachbegriff: Enuresis Nocturna) mit einem Weckapparat kann in den meisten Fällen eine Lösung des Problems erreicht werden.

Durch das Training soll der nicht vorhandene Reflex des Aufwachens durch den Blasendruck antrainiert werden.

Nach heutiger Erkenntnis spricht man bei weniger als zwei nassen Nächten pro Monat von einem Normalzustand.

nicht für Kinder unter 3 Jahren zugänglich machen.
örtlichen Umweltberater erfragen.

Technische Daten (Weckapparat)

Größe Gerät:	31 x 18 x 76 mm (H x B x L)
Größe Fühler:	11 x 7 x 19 mm (H x B x L)
Gewicht:	55 g
Batterie:	2 x 3V Lithium CR 2032

Lieferumfang

Piesel-Piepser	Best.-Nr. 20001 PZN 0960183 HiMi.: 15.25.18.0017
Aufbewahrungsdose	Best.-Nr. 20002
Batteriesatz á 2 St.	Best.-Nr. 20003
Schaltstift	Best.-Nr. 20004
Bedienungsanleitung	Best.-Nr. 20005
Kind-Tabelle	Best.-Nr. 20006
Aufkleberset	Best.-Nr. 20007
Behandlungsprotokoll	Best.-Nr. 20008

Zubehör (optional)

Sensor Matte	Best.-Nr. 20020 PZN 7229740
--------------	-----------------------------

Gebrauchsanweisung
Behandlungsprotokoll
Kind-Tabelle
Aufklebersatz



Aufbewahrungsdose

Fühler



Batteriesatz



Schaltstift



Piesel-Piepser

Die Tagebücher

Das **Tagebuch** ist von den Eltern zu führen. Pro Tag/Nacht stehen 4 Felder zur Verfügung, hier sollten die jeweiligen Zeiten des Wecksignals eingetragen werden. Zur besseren Kontrolle kann man hier detaillierte Informationen eingeben, nach z. B. folgenden Kriterien:

- N** = nass, komplette Blasenentleerung ins Bett
- BF** = Bett feucht aber nicht nass
- UF** = Unterhose feucht
- T** = Trocken

Das **Tagebüchlein** ist vom Kind zu führen. Bei guter Mitarbeit, d.h. wenn das Kind schnell wach wird (auch mit Hilfe der Eltern), darf sich das Kind ein Aufkleber als Belohnung einkleben. Im weiteren Verlauf, natürlich auch wenn kein Alarm ausgelöst wurde oder wenn die Nacht trocken war. Nach einer nassen Nacht soll es hier nur ein Kreuz oder Strich eintragen.

Anwendung

Ein- oder Ausschalter für den Betrieb des Weckapparates.

Zum **Einschalten**, den Schaltstift an der Unterseite herausziehen - das Gerät ist eingeschaltet. Die Betriebsbereitschaft wird durch ein kurzes Leuchten der roten LED sowie ein Piepton (nicht wenn das Gerät auf -VIBRA- eingestellt ist) signalisiert.

Zum **Ausschalten** den Schaltstift in die Öffnung einstecken, die Maus ist ausgeschaltet und von der Batterie getrennt.

Pauseknopf zum vorübergehenden Stummschalten des Alarms den Pauseknopf drücken. Unterbricht den Alarm, zum Wechseln der Unterwäsche und den Toilettengang, für ca. 30 Sec.

Inbetriebnahme: den roten Feuchtigkeitsfühler einstecken, zum besseren Halt Kabel unter Mausschwänzchen klemmen. Die Alarmfunktion auswählen (die auf der Gerätunterseite mit dem Schaltstift eingestellt werden kann) dann das Gerät einschalten.

Der **Alarm** kann auf drei verschiedene Arten erfolgen:

1. nur Piepton
2. nur Vibration
3. (Vibra+Alarm) Vibration und Piepton

Durch das Feuchtwerden des Fühlers wird der eingestellte Alarm ausgelöst. Jetzt muss der Fühler aus der nassen Hose entfernt, gründlich mit warmen Wasser gespült und getrocknet werden. Den Fühler in einer trockenen Unterhose erneut anbringen.



Anbringung

1. Das Gerät ist mit der Unterseite an einer Stofffalte des Pyjamas einzuklemmen ca. in Schulterhöhe.

2. Danach ist der Fühler in der Unterhose zu befestigen.

A. Beim Mädchen

ca. im Bereich der Scheide.



Befestigung
wie auf neben-
stehender
Abbildung.



B. Beim Jungen
im Bereich der
Penisöffnung.



auf eine sorgfältige Führung unter dem Schlafanzug achten.

10 Tips für das erfolgreiche Training

1. Haben Sie als erstes Geduld.
2. Motivieren Sie Ihr Kind zum Training.
3. Der Weckapparat ist jede Nacht zu benutzen.
4. Besprechen Sie die Funktion und üben das Wechseln des Fühlers in aller Ruhe.
5. Probieren Sie, wo das Gerät vom Kind als am wenigsten störend empfunden wird.
6. Lassen Sie das Kind vor dem Schlafengehen noch mal auf die Toilette gehen.
7. In der Anfangsphase wird das Wecksignal oft nicht gehört, wecken Sie das Kind in den ersten paar Tagen.

Meist wird das Kind nach wenigen Tagen schon von alleine wach (Behandlungszwischenziel).

8. Das Kind sollte nach einiger Zeit den Alarm selbstständig ausschalten können, helfen Sie ihm bis es soweit ist.
9. Um eine Kontrolle über ständige Nutzung zu haben verwenden Sie und Ihr Kind beiliegende Tagesbücher.
10. Nach erfolgreicher Behandlung senden Sie bitte das Tagebuch an den Hersteller. Sie erhalten eine kleine Überraschung als Dankeschön. Die Daten werden für statistische Zwecke benötigt.

Mögliche Fehler und deren Beseitigung

Das Gerät gibt keinen Alarm

Prüfung: Funktionstest, indem man beide Kontakte aneinanderhält; Wecksignal ertönt, **Gerät Ok.**

Ursache: Fühler schlecht platziert.

Abhilfe: Fühler anders platzieren.

Wecksignal ertönt nicht

1. Ursache: Batterie leer.

Abhilfe: Batterie wechseln wie in folgender Anleitung beschrieben.

2. Ursache: Gerät defekt.

Abhilfe: Reparatur durch den Fachhändler oder Hersteller.

Das Wecksignal ist leiser als am Anfang

Ursache: Die Batterie wird schwächer.

Abhilfe: Batteriewechsel wie in folgender Anleitung beschrieben.

Batteriewechsel:

Batteriefachdeckel abschrauben und 2 neue Batterien (CR-2032) einlegen hierbei die Polarität beachten, die Pluspole zeigen aus dem Gerät heraus.



Gerät einschalten

Der Piesel Piepser ist bei der Auslieferung mit einem Schaltstift versehen der die Stromunterbrechung gewährleistet. Solange der Schaltstift im Piesel Piepser steckt ist das Gerät ausgeschaltet.

Sie aktivieren den Piesel Piepser durch herausziehen des Schaltstifts.

Der Schaltstift wird darüberhinaus dazu verwendet, die Alarm/Vibra Einstellung zu verändern.



Achtung: Der Schaltstift muß gemäß Bauform eingesetzt werden.

EG-Konformitäts-Erklärung

EG-Konformitäts-Erklärung im Sinne der EG-Richtlinie Medizinprodukte
93/42/EWG, Anhang VII

Die Bauart des Produktes entspricht der Klasse I

Piesel-Piepser

Das Produkt ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG, in alleiniger Verantwortung von:


Osthoff-Vertretungen, Eintrachtstr. 41, 40699 Erkrath

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

EN60601-1, EN60601-1-1,
EN60601-1-2, EN1441

Eine Technische Dokumentation mit Risikoanalyse ist vollständig vorhanden.

Die zum Produkt gehörende Gebrauchsanweisung liegt vor in der Originalfassung.

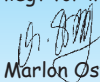

Marlon Osthoff, Erkrath

Garantiebedingungen: 2 Jahre ab Kaufdatum.
Ausgenommen: Batteriewechsel.

Händlerstempel:

Datum:

Osthoff-Vertretungen · Postfach 4146 · 40688 Erkrath
www.piesel-piepser.de · Email: info@piesel-piepser.de
Telefon 0 2104-94 81 81 · Fax 0 2104-94 81 93